



**DIE PRONTOSAN<sup>®</sup> FAMILIE  
HAT ZUWACHS ERHALTEN!**



# Prontosan® Debridement Pad

## EFFEKTIVE UND SANFTE WUNDREINIGUNG

Als unterstützende Komponente zum Prontosan® Wundreinigungssystem haben wir das Prontosan® Debridement Pad entwickelt.

### Was ist Prontosan® Debridement Pad?

Das Pad besteht aus einer reinigenden Mikrofaserseite und einer darüber liegenden absorbierenden Schicht. Die Mikrofaserseite entfernt Wundbeläge, Keime und Biofilm, während das dabei aufgenommene überschüssige Wundexsudat in der absorbierenden Aussenseite gespeichert wird.

### Erfolgsfaktor Mikrofasertechnologie

Mikrofaseren sind in der Lage, kleinste mikroskopische Partikel an sich zu binden und damit aus dem Wundbett zu entfernen. Mikrofasern funktionieren über adhäsive Kräfte, welche die Partikel anziehen, in ihrer Struktur aufnehmen und damit eine sanfte und gleichermassen effektive Reinigungswirkung erzielen. Die grosse Anzahl der Fasern gewährleistet eine hohe Aufnahmekapazität.

### Wie wird Prontosan® Debridement Pad angewendet?

Die faserige Seite des Pads wird in der Blisterpackung vorteilweise mit Prontosan® Wundspüllösung angefeuchtet. Anschliessend wird mit dieser befeuchteten Seite die Wundoberfläche mit leichtem Druck in zirkulären Bewegungen gereinigt.



Die breite Seite des Pads sollte zur grossflächigen Reinigung eingesetzt werden.



Mit der spitzen Seite lassen sich schmale Wundbereiche sowie kleine Taschen z.B. unter dem Wundrand reinigen.

### VORTEILE PRONTOSAN® DEBRIDEMENT PAD

- Schnelles und sauberes Debridement dank der Mikrofasertechnologie
- Einfache Anwendung für ein sauberes Wundbett und eine reizlose Umgebungshaut
- Ein weiches Debridement ohne Gewebereizung
- Einzigartige Tropfenform für schwer zugängliche Wundstellen
- Praktische Blisterpackung zum sicheren und aseptischen Einweichen des Pads vor Gebrauch



**MUSTER**  
Darf nicht am Patienten  
angewendet werden!

### HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Prontosan® Debridement Pad kann ab sofort bei B. Braun oder Ihrem Händler bestellt werden.

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode
12 x 8.3 cm, tropfenförmig	3 Stück	3908456	7313096
12 x 8.3 cm, tropfenförmig	10 Stück	3908457	7313104

#### Zusammensetzung

Mikrofaser aus Polyester / Polypropylen, absorbierende Schicht aus Propylen. Die Pads sind einzeln steril verpackt.

#### Unser Sales Support steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung:

Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | [sales-hospital.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bbraun.com)

Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com)

# NEWS